


## Beutel für Broviac- bzw. Hickman-Katheter

(© Sandra Heinze)

Der Broviac- oder Hickman-Katheter wird oft bei Kindern eingesetzt. Der Ausgang des Katheters ist am Bauch. Damit dieser geschützt ist, ist es möglich, einen Katheter-Beutel zu nutzen.

So sähe es aus, wenn er getragen wird (Das rosane ist der Katheter):

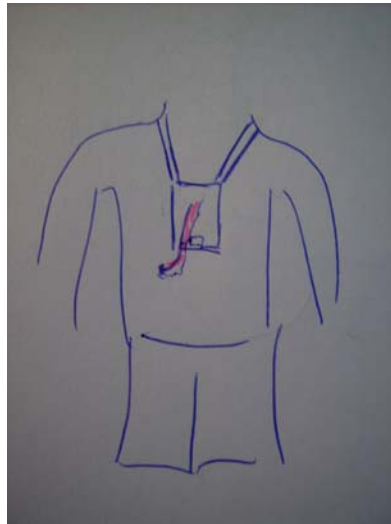

Schnittmuster (ohne Nahtzugabe):

Kurze Seite: 12 cm

Lange Seite: 16 cm

Das Band sollte 90 cm lang und ca. 1,5cm bis 2 cm breit sein. Wichtig ist, dass das Band dünn ist, damit man es hinter dem Hals verknoten kann.

Das Schnittmuster wird zweimal zugeschnitten. Es muss nicht gedoppelt sein. Eine kurze Seite eines jeden Zuschnitts wird versäubert. Dort kommt zentriert auf die linke Seite des Stoffes je ein Teil des Klettbandes. An der gegenüberliegenden kurzen Seite werden beide Bandenden mitgefasst. Diese Seite und die langen Seiten werden rechts auf rechts zusammengenäht. Wenden und fertig!

